

MANN

URSEC® SICHERHEITS URINAL

FRAU

Das einzige Urinal ohne Deckel oder Verschluss, das in allen möglichen Positionen eine Kapazität von bis zu 1 Liter Inhalt hat
FÜR BETTLÄGRIGE, PROSTATATA- UND PARKINSONPATIENTEN, KÖRPERBEHINDERTE UND SANITÄTSTRANSPORTE ...

RÜCKFLUSSSCHUTZ
PERMANENTE SICHERHEIT

ABNEHMBARER GRIFF
PHOSPHORESZIEREND

MTQUICK®
MIT AUSGÜß

AIR PASS®

Bequem und umkehrbarer

Schraubverschluss
Einfach und sauber in
die Hand zu nehmen:
Hygiene

Soft
Touch

FRAU

Meßskala

TULPE

ergonomisch,
abnehmbar
(zusätzlich erhältlich)

EINBUCHTUNGEN

Zum Anfassen

HYGIENE

es ist nicht notwendig,
einen verschmutzten Deckel
zu berühren: unmittelbarer
und praktischer Zugriff

**verschraubbarer
Rückflußschutz:**

keine Gefahr des Auslaufens

runde angenehme
Formen

URSEC lässt sich
einhändig benutzen

STERILISIERBAR BEI 130°C

oder mit Chlorwasser


Polypropylen: wird nicht gelb

DURCHSICHTIG

man sieht, ob URSEC sauber ist oder geelert werden muß
Rückflußschutzkapazität: 1 Liter

Aktive Vorbeugung gegen nosokomiale Infektionen

SCHLUß DAMIT :

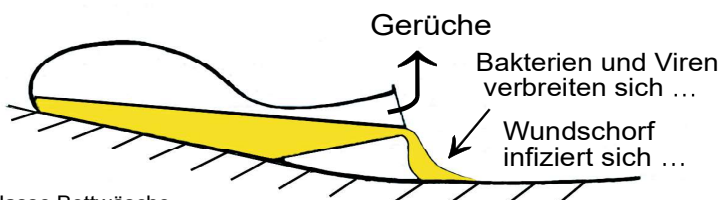


Nasse Bettwäsche

→ Unbequemlichkeit, Reinigungs- und Desinfektionskosten

Ansteckungsgefahr ...

... MIT URSEC !

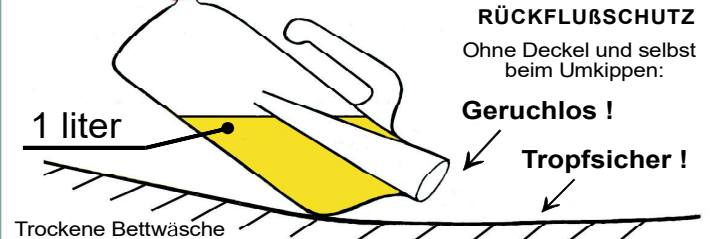

Trockene Bettwäsche

→ Komfortabel und sparsam

Bakterien und Viren bleiben isoliert: Absolute Hygiene !

3 "UNFÄLLE" VERMIEDEN ... UND DER KAUF VON URSEC HAT SICH GELOHNT !

ERHÄLTlich BEI:

Exklusiv hergestellt von:

GOUGE



Dept. Sanorex
3, Rue d'Auteuil
Paris, Frankreich

INTERMEDICA-PREIS
PERFORMANCES



Eingetragenes Markenzeichen
und Gebrauchsmuster
Patentiert in 21 Ländern

Nur zu Informationszwecken; die Charakteristika von URSEC können variieren.

Internet: www.gouge.com

MANN

URSEC®

FRAU


URINAL MIT RÜCKFLUSSSCHUTZ, MTQUICK® UND DEFLEKTOR

Das einzige Urinal ohne Deckel oder Verschluss, das in allen möglichen Positionen eine Kapazität von bis zu 1 Liter Inhalt hat

WARUM URSEC VERWENDEN ?

- ➔ **ABSOLUTE SICHERHEIT** : verschraubbarer Rückflußschutz, keine Gefahr des Auslaufens. Leicht zu reinigen (mit Chlorwasser)
- ➔ **PRAKTISCH** : verschmutzte und platzraubende Deckel oder Verschlüsse müssen nicht entfernt werden. Sofort verwendbar.
- ➔ **URSEC IST DURCHSICHTIG** : sofortige visuelle Kontrolle des Inhalts möglich (Sauberkeit, Menge).
- ➔ **100% EFFIZIENT** : Kapazität bis zu 1 Liter in allen möglichen Positionen, selbst beim Umfallen.
- ➔ **KEIN VERSCHLUß ODER DECKEL** : daher keine Urinreste oder Geruchsbelästigung beim Abschrauben.


HERGESTELLT AUS LEICHT ZU HANDHABENDEM PROPYLEN, STERILISIERBAR IM AUTOKLAV UND WIEDERVERWENDBAR.

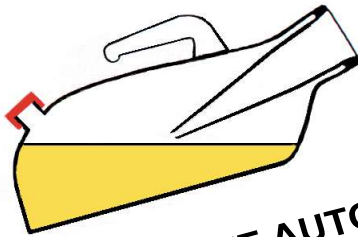

LÄSST SICH EINHÄNDIG BENUTZEN!

DAS ERSTE AUTOKLAVIERBARE SICHERHEITSURINAL MIT RÜCKFLUSSSCHUTZSYSTEM UND MTQUICK®

PHOSPHORESZIERENDER GRIFF!

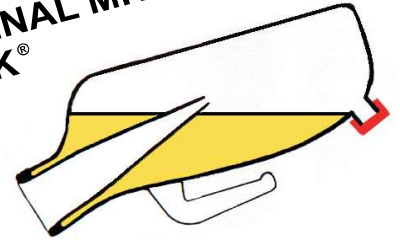**VORTEILE FÜR DEN BETTLÄGERIGEN**


- Wenn URSEC beim Schlafen im Bett umkippt, bleibt das ohne Konsequenzen : Mit dem Rückflußschutz **bleibt die Bettwäsche trocken**.
- URSEC kann ohne Risiko auch im Dunkeln gehandhabt werden. Das Entleeren erfolgt über den **MTQUICK®** Ausguß.
- Verschließbar durch den: - **Standard-Schraubverschluss** (weiß), der einfach aufgeschraubt wird,
- **Sicherheits-Schraubverschluss** (rot), so konzipiert, daß er nicht unabsichtlich geöffnet werden kann
- Mit dem URSEC-Konzept ist der Flaschenhals geneigter und **immer verwendungsbereit** (kein Stopfen abzuziehen).
- **Der Nutzinhalt beträgt ungefähr 1 Liter**. Hat man URSEC im Bett zur Verfügung, kann man in aller Ruhe schlafen.
- **Um die Handhabung von URSEC noch zu vereinfachen, verwenden die Benutzer gerne den abnehmbaren ergonomischen Handgriff.**

VORTEILE FÜR DIE PFLEGEINRICHTUNG

- **Sicherheit: Dank Rückflußschutz ist selbst beim Umkippen ein Auslaufen bei URSEC nicht möglich. Verhindert verschmutzte Bettwäsche (Wundliegen), häufiges Wechseln. Mikroben verbreiten sich nicht mehr, vermindertes Risiko nosokomialer Infektionen. Einsparungen beider Reinigung und beim Desinfizieren. URSEC ist wiederverwendbar.**
- Während der ganzen Nacht bleibt URSEC ohne Risiko im Bett der Bettlägerigen, die nicht mehr klingeln müssen.
- Da URSEC zu 96% verschlossen ist, wird kaum Geruch freigesetzt. Der Gebrauch ist **geräuscharm**.
- Aus wiederverwendbarem Plastik hergestellt, sind die URSEC diskret durchsichtig, sodaß das Füllniveau einfach abgelesen werden kann.
- Die URSEC haben ein gefälliges Design. Da sie graduiert sind, können zwei URSEC wie ein 24Std.- Behälter eingesetzt werden.
- Sie sind waschbar (Chlorwasser oder Desinfektionsmittel) mit oder ohne Flaschenspüler und können im **Autoklav bei 130°C** sterilisiert werden.
- Der Ausguß des **MTQUICK®** ermöglicht die Entnahme von Proben und ein sauberes Entleeren ohne Geruchsentwicklung.
- Drei Bettlaken -Schlafanzug- und Bettdeckenwechsel, die durch den Einsatz von URSEC vermieden wurden, ausgenügen, um den Kaufpreis zu amortisieren.


URSEC: IHRE HYGIENE VERSICHERUNG**DURCH DIE VERBESSERUNG DER HYGIENE IN DEN PFLEGEINRICHTUNGEN HILFT URSEC BEI DER QUALITÄTSSICHERUNG****BENUTZUNG**

Die URSEC werden nicht sterilisiert geliefert. Vor Gebrauch sterilisieren.
Die URSEC werden flach im Bett oder von Hand mit einer leichten Neigung eingesetzt.
Sie müssen immer mit dem aufgeschraubten Rückflußschutzkonus benutzt werden.
Sie müssen entleert werden, bevor die Inhaltsanzeige einen Liter anzeigt.
Nach dem Ausspülen werden die URSEC wieder durchsichtig.
Schluß mit den undurchsichtigen Urinflaschen mit undefinierbaren Farben!

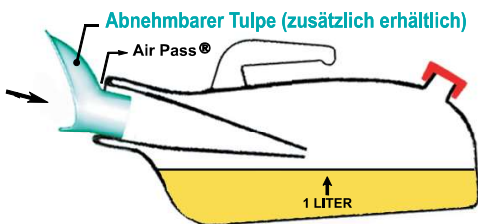**URSEC + TULPE = URSEC FÜR FRAUEN**Entleerung mit dem **MTQUICK®****SÄUBERUNG - STERILISIERUNG**

URSEC für Frauen: Entfernen Sie die abnehmbare Tulpe.
Für beide Modelle:

Rückflußschutz und **MTQUICK** aufschrauben.
Zuerst mit klarem Wasser, dann entweder mit Chlorwasser oder einem Desinfektionsmittel ausspülen.
Sterilisieren im Autoklav bei 130°C (außer dem Sicherheits-Schraubverschluss) oder Gassterilisation mit Ethylenoxyd.
Rückflußschutz und **MTQUICK** wieder aufschrauben

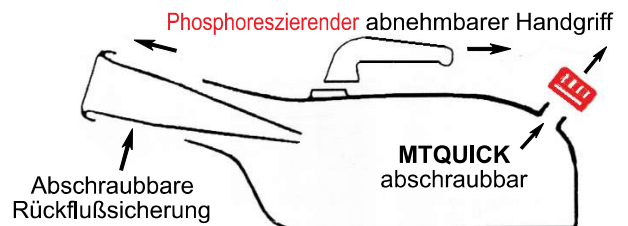**URSEC FÜR MÄNNER****3 Unfälle vermieden .. und der Kauf von URSEC hat sich gelohnt : URSEC hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis !**

- 3 mal Bettwäsche-Schlafanzug- und Bettdeckenwechsel, und Sie haben den Preis von URSEC amortisiert ! Danach sparen Sie weiter und haben die Hygiene zusätzlich. In Krankenhäusern, Kliniken, Seniorenheimen oder zu Hause bedeutet die Verwendung von URSEC auch eine Einsparung bei Desinfektionsmitteln und bringt dem Bettlägerigen einen unvergleichlichen Komfort.
- URSEC ist komfortabel und benutzerfreundlich für Bettlägerige, verbessert die Hygiene und vereinfacht die Arbeit des Pflegepersonals, Daher entscheiden sich kostenbewußte öffentliche und private Pflegeeinrichtungen für URSEC.