

PORTE-URINAL UNIVERSEL

EN POLYPROPYLÈNE
POUR URINAL ANTI-REFLUX URSEC®

Enfin un Porte-urinal multi-fonctions avec couvercle conçu pour être:

- Un Porte-urinal s'accrochant ou se fixant à hauteur variable contre le bord d'un lit
- Un Porte-poche à urine le long d'un lit
- Un coffret de transport et un présentoir (repliable) contenant URSEC® et sa notice
- Un coffret de rangement pratique, de stockage et de présentation d'URSEC®

FACILEMENT NETTOYABLE ET STÉRILISABLE A 130°C

1/ Coffret de transport et présentoir



Pendant le transport ou le stockage, **URSEC** est maintenu à l'intérieur du coffret par l'intermédiaire de l'attache métallique amovible (1) insérée dans les trous (2) prévus à cet effet sur l'un des deux petits rabats.

Le rabat moyen (3) percé permet de suspendre le coffret pour présenter **URSEC** dans un linéaire de magasin.

Pour des d'informations sur l'urinal anti-reflux **URSEC**, demandez notre documentation.



2/ Coffret de rangement

Ainsi conditionné, **URSEC** peut être stocké à l'abri de la poussière.

La forme rectangulaire de ce coffret rend facile et pratique son empilage et son stockage.

MISE EN PLACE DU PORTE-URINAL

Pour l'accrocher au bord d'un des montants d'un lit ou d'une chaise roulante: ôter l'attache métallique formant crochets (1) de sa position de transport (2) et l'insérer dans les deux trous d'entre-axe 70 mm (4) du coffret prévus à cet effet, en choisissant ceux convenant à la hauteur désirée par l'alité. Une autre possibilité est de fixer le coffret par deux vis préalablement vissées partiellement dans le bois d'un lit en utilisant les deux trous espacés de 133 mm avec boutonnières (5).

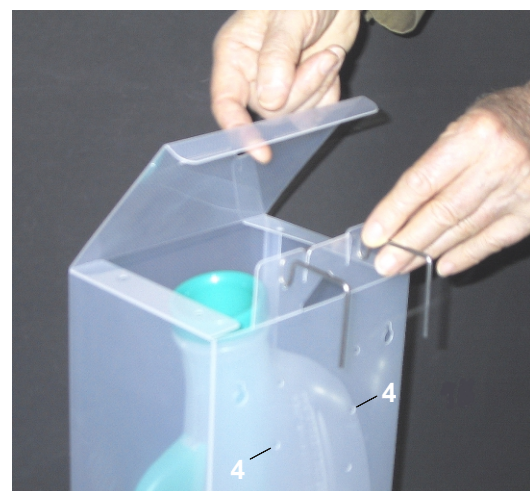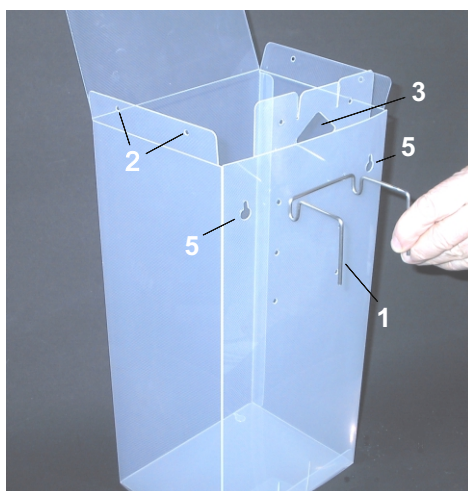

Une fabrication exclusive **GOUGET**® 3, Rue d'Auteuil 75016 Paris France
Tel +33 (0)1 42 88 57 84 - Fax +33 (0)1 45 24 45 01 - www.gouget.com
- Modèle déposé - Patent pending -

EN VENTE CHEZ LES REVENDEURS MÉDICAUX ET EN PHARMACIE
DEMANDEZ URSEC URINAL ANTI-REFLUX POUR HOMME: CODE A.C.L. 715 1512

URSEC URINAL ANTI-REFLUX POUR FEMME: CODE A.C.L. 715 1512 + CODE A.C.L. 769 0841

TULIPE FÉMININE (S'EMBOÎTE DANS L' URSEC HOMME): CODE A.C.L. 769 0841

PORTE-URINAL UNIVERSEL POUR URSEC (Homme ou Femme) : CODE A.C.L. 715 1529

(fixé sur le côté du lit)